



PRO-VISION Gocce Oculari



PRO-VISION gocce oculari è un Dispositivo Medico per applicazione oftalmica costituito da una soluzione salina isotonica sterile, a pH fisiologico, non viscosa, senza conservanti, con acque distillate di piante (incluso Mirtillo Nero), Acido Ialuronico e Glicerina.

La formulazione PRO-VISION è priva di conservanti ed è adatta anche per un uso frequente e prolungato.

ISTRUZIONI PER L'USO:

1. Aprire la busta protettiva in alluminio
2. Separare il flaconcino monodose dalla striscia di 5 unità
3. Ruotare e staccare il tappo della fiala
4. Premere delicatamente il flaconcino monodose e somministrare 2/3 gocce per occhio
5. Dopo l'applicazione, chiudere immediatamente la fiala con il suo tappo e utilizzare il contenuto avanzato entro 12 ore
6. Conservare i flaconcini inutilizzati nella loro busta di alluminio originale
7. Il prodotto è monopaziente
8. Il prodotto può essere utilizzato con lenti a contatto

COMPOSIZIONE: Acqua distillata di *Vaccinium myrtillus*, Acqua distillata di *Hamamelis Virginiana*, Acqua Distillata di *Camomilla Recutita*, acqua distillata di *Euphrasia Officinalis*, ialuronato di sodio, glicerina, cloruro di sodio, idrogeno disodico fosfato dodecaidrato, sodio diidrogeno fosfato monoidrato, acqua purificata q.b. fino a 100 ml.

CONFEZIONE:

La scatola è composta da:

- 2 buste di alluminio

ciascuno contenente una striscia monodose da 5 flaconcini: ogni flaconcino è da 0,5 ml e richiudibile.

AVVERTENZE:

- Il prodotto è solo per uso oftalmico.
- Non utilizzare il prodotto se la confezione è danneggiata o la bottiglia non è perfettamente integra.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Pulire accuratamente le mani prima di aprire la fiala.
- Non toccare l'occhio o altre superfici con l'ugello della fiala durante l'installazione.
- Non utilizzare il prodotto in caso di incompatibilità nota anche ad un solo componente del formulato.
- Se necessario, verificare con il proprio ottico la compatibilità del collirio con le lenti a contatto utilizzate.
- In caso di disturbi durante l'uso, sospendere immediatamente il trattamento e contattare un medico.
- Qualsiasi somministrazione di uno o più farmaci oftalmici deve avvenire almeno 15 minuti dopo l'instillazione di questi colliri, soprattutto se i prodotti contengono benzalconio cloruro, o altri sali quaternari di ammonio, per evitare la precipitazione di acido ialuronico.
- La somministrazione di farmaci oftalmici in concomitanza con questi colliri deve essere effettuata sotto la supervisione di un medico che possa valutare le possibili interazioni.
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.
- Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore ed esposizione diretta alla luce solare, ad una temperatura non superiore a 30 ° C.

VALIDITA': 36 mesi con confezione integra.